

medi

medi Rehab[®] one

Effektive Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und Verletzungen am Bewegungsapparat

Beide Varianten mit offener oder geschlossener Spitze erhältlich.



medi. ich fühl mich besser.

medi Rehab[®] one


Speziell für die posttraumatische und postoperative Ödemtherapie

medi Rehab one ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf, den medi speziell zur Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt hat.

Er vereint bewährte medizinische Kompression mit einer innovativen Stricktechnologie und cleveren Details. Die Handhabung wird dadurch für Ihre Patienten leichter, sicherer und komfortabler.

Der medi Rehab one unterstützt die Ödemtherapie nach vielen orthopädischen Eingriffen und Verletzungen, beispielsweise in Folge eines Supinationstraumas am Sprunggelenk, nach Ligament-Verletzungen am Knie, bei Frakturen oder auch in der Rehabilitationsphase nach endoprothetischen Eingriffen.

Der medi Rehab one überzeugt mit vielen Details und setzt neue Maßstäbe in der posttraumatischen und postoperativen Kompressionstherapie zur Ödemreduktion und -vermeidung.

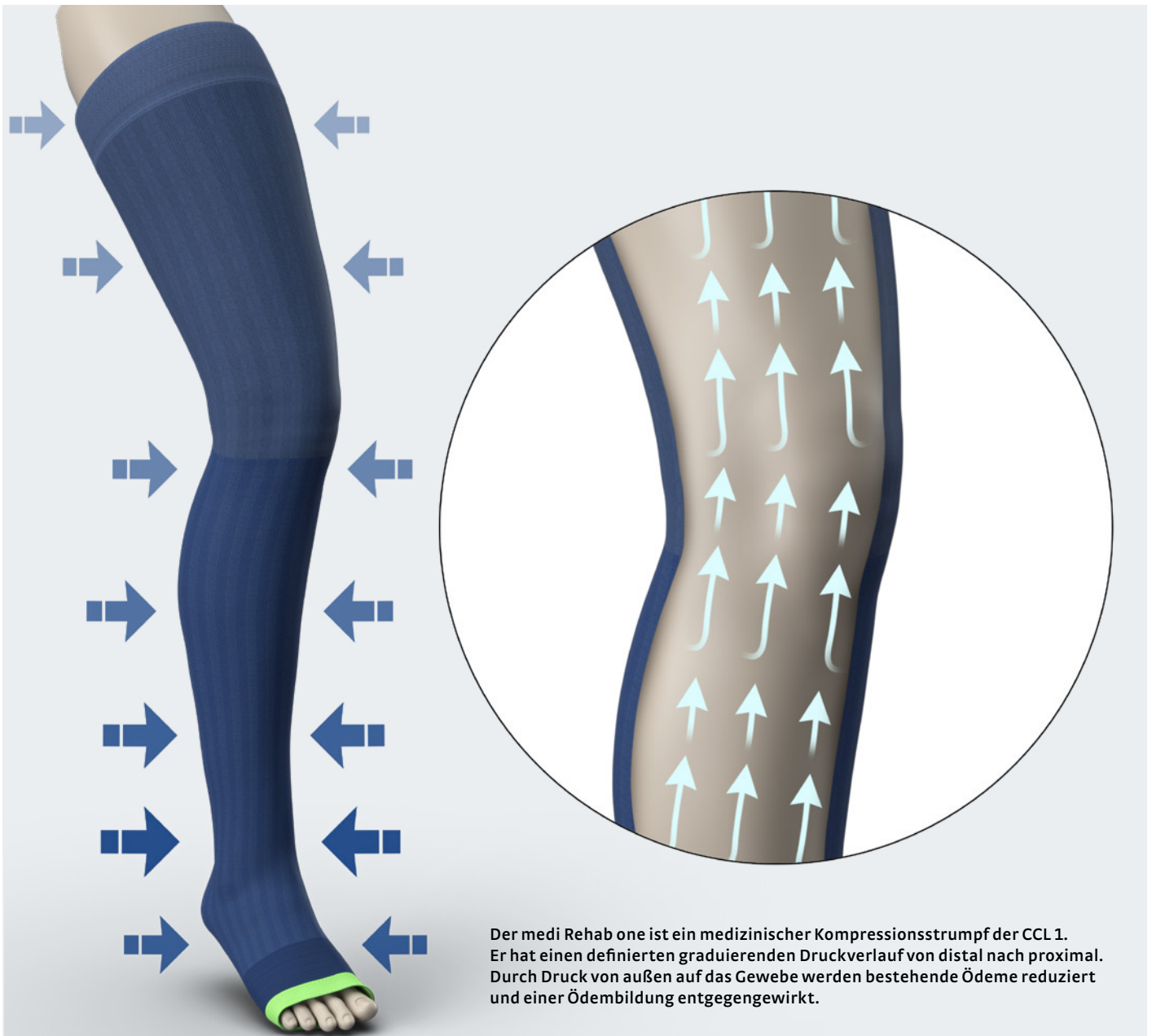


medi Rehab[®] one AG

Kompressionsstrumpf zur posttraumatischen
und postoperativen Ödemtherapie

Hilfsmittelnummer: 17.06.03.0103

Hilfsmittelnummer Haftrand: 17.99.99.2008

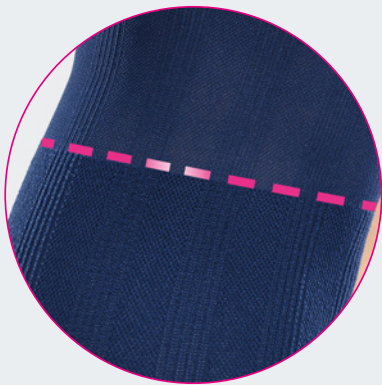

Eingestrickte Positionierungshilfe
unterhalb des Knies für leichte
und sichere Handhabung im
Alltag.



Bewährtes Mikronoppen-
Haftband sensitiv für zusätz-
lichen Halt und angenehmen
Tragekomfort auf der Haut.



Dünn und besonders atmungs-
aktiv am Oberschenkel und im
sensiblen Beugebereich der
Kniekehle für mehr Tragekomfort.



Wahlweise mit geschlossener oder
offener Spitze.

Kompression und Stabilisierung

Die ideale Kombination für die Therapie bei Knieverletzungen

Stabilisierungsothesen



M.4s® comfort	M.4s® PCL dynamic	M.4 X-lock®
23.04.03.3013	(beantragt für 23.04.xx.xxxx)	23.04.03.3013
Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹	Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹	Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹



Bei all diesen diesen Stabilisierungsothesen liegt eine hochwertige Kühlkompress kostenlos in jeder Produktverpackung bei.

Softorthesen



Stabimed® RICE ²	Stabimed® pro RICE ³	Collamed® / Collamed® long
23.04.03.1051	23.04.03.1051	23.04.03.2008
Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹	Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹	Knieführungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions- / Flexionsbegrenzung ¹

Ruhigstellungs- & Post-OP-Orthesen



medi® ROM	medi® Classic	medi® Classic air	medi® Jeans	medi PTS®
23.04.02.0006	0° 23.04.01.0009 20° 23.04.01.1003	0° 23.04.01.0009 20° 23.04.01.1003	0° 23.04.01.0010 30° 23.04.01.1004	23.04.01.3002
Knieorthese zur Mobilisierung ¹	Knieorthese zur Immobilisierung ¹	Knieorthese zur Immobilisierung ¹	Knieorthese zur Immobilisierung ¹	Knieorthese zur Immobilisierung und Entlastung ¹

¹ Zweckbestimmung

² Mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion erhältlich.

Schenkelstrumpf medi Rehab[®] one AG

Indikationen

- Ödeme
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Hilfsmittelnummer AG: 17.06.03.0103

Hilfsmittelnummer Haftrand: 17.99.99.2008

Warum gerade medi Rehab one Schenkelstrumpf (AG)?

Positionierungshilfe Knie für leichte und korrekte Handhabung

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei

Geb.-pfl.

noctu

Sonstige

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Unfall

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Arbeitsunfall

BVG Hilfs- Impf- Spr.-St. Begr.- Apotheke-Nr. / IK

mittel stoff Bedarf Pflicht

6 7 8 9

Zuzahlung Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe

Vertragsarztstempel

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

17.06.03.0103 / 17.99.99.2008

Diagnose: postoperatives Ödem


2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe zur hygienischen Wechselversorgung, medi Rehab one CCL 1, Schenkelstrumpf AG, mit Haftrand offene Fußspitze

Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2002)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

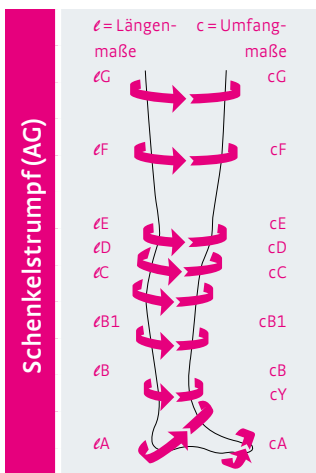

Größe	II	III	IV	V	VI
HB normal	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68
HB weit	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81
Umfang cG (cm)	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81
Umfang cF (cm)	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73
Umfang cE (cm)	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51
Umfang cD (cm)	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
Umfang cC (cm)	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
Umfang cB1 (cm)	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
Umfang cB (cm)	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Umfang cY (cm)	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40
Umfang cA (cm)	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34
Art.-Nr.	R.A.Δ◇.4□2	R.A.Δ◇.4□3	R.A.Δ◇.4□4	R.A.Δ◇.4□5	R.A.Δ◇.4□6

- Δ = Länge ergänzen:
6 = normal (72 – 83 cm),
5 = kurz (62 – 71 cm)
- ◇ = Variante ergänzen:
1 = Mikronoppen-Haftband sensitiv, normal
5 = Mikronoppen-Haftband sensitiv, weit
- = Fußspitze
0 = offene Spitze
1 = geschlossene Spitze

Wadenstrumpf medi Rehab[®] one AD

Indikationen

Ödeme

- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Hilfsmittelnummer AD: 17.06.01.0118

Warum gerade medi Rehab one Wadenstrumpf (AD)?

Mikro-Plüsch für leichtes Anziehen

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei

Geb.-pl. noctu

Sonstige

Name, Vorname des Versicherten

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Arbeitsunfall

BVG	Hilfs- mittel- Nr.	Impl- stoff	Spr.-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
6	7	8	9		
Zuzahlung			Gesamt-Brutto		
Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.			Faktor		Taxe

Vertragsarztstempel

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

17.06.01.0118

Diagnose: posttraumatisches Ödem

2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe zur hygienischen Wechselsversorgung, medi Rehab one CCL 1

Wadenstrumpf AD, offene Fußspitze

Mikro-Plüsch für leichtes Anziehen

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2002)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebnummer
-----------	------------------------------------

Wadenstrumpf (AD)	ℓ = Längen- maße	c = Umfang- maße	Größe	II	III	IV	V	VI
			Umfang cD (cm)	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
			Umfang cC (cm)	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
			Umfang cB1 (cm)	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
			Umfang cB (cm)	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
			Umfang cY (cm)	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40
			Umfang cA (cm)	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34
			Art.-Nr.	R.A4△.4□2	R.A4△.4□3	R.A4△.4□4	R.A4△.4□5	R.A4△.4□6

△ = Länge ergänzen:
0 = normal (39 – 44 cm),
7 = kurz (34 – 38 cm)

□ = Fußspitze
0 = offene Spitze
1 = geschlossene Spitze

medi Rehab[®] one AD

Kompressionsstrumpf zur posttraumatischen
und postoperativen Ödemtherapie

Hilfsmittelnummer: 17.06.01.0118



3D-Längsrippen erleichtern das
korrekte Anlegen und geben
Sicherheit bei der Handhabung.



Breites Kniestrumpf-Bündchen
für zusätzlichen Halt.



Größenindividueller Vorfuß für
verbesserte Passform.



Vorgeformte Ferse für eine
leichte Positionierung und
einen verbesserten Sitz.



Wahlweise mit geschlossener
oder offener Spitze.

Zweckbestimmung: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen

Die Vorteile im Überblick

Innovative **Stricktechnologie mit Mikro-Plüsch** für leichtes Anziehen und sicheren Sitz

Positionierungshilfe und 3D-Längsrippen zur sicheren Handhabung und leichtem Anlegen

Dünn und besonders atmungsaktiv im sensiblen Beuge- und Oberschenkelbereich

Thermoregulierender Merino-Plüsch im Mittel- und Vorfußbereich für mehr Tragekomfort

Bewährte **medizinische Kompression CCL 1**.
Zusätzlich: Angenehme Kompression bereits im Mittelfußbereich

Ideale Ergänzung in der Therapie bei Knie und Sprunggelenksverletzung in Kombination mit den medi Orthesen

Weiterführende Informationen zum Produkt

Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/rehab-one gelangen Sie zu weiteren Informationen und (Anzieh-)Videos zum medi Rehab one.



medi e-shop für Händler

Bequem online bestellen – rund um die Uhr



Gleich anmelden!

Registrieren Sie sich einfach unter www.medi.biz/e-shop oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Endgerät.



Kompression und Stabilisierung

Die ideale Kombination für die Therapie bei Fußverletzungen

Sprunggelenkorthesen



medi® Ankle RTS®	medi® Ankle sport brace	M.step®	Levamed® stabili-tri®
23.02.02.1051	23.02.02.1045	23.02.02.0011	23.02.04.0004
Einstellbare Sprunggelenk-orthese zur Stabilisierung in einer Ebene ¹	Einstellbare Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene ¹	Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene ¹	Abrüstbare Sprunggelenkorthese zur Mobilisierung in definierter Position ¹

Unterschenkel-Fußorthesen



protect.CAT Walker	protect.CAT Walker short	medi® ROM Walker
23.06.01.0045	23.06.01.0065	
Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position ¹	Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position ¹	Unterschenkel-Fußorthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen ¹

¹Zweckbestimmung



Offizieller Förderer der Deutschen Kniegesellschaft e. V.



Offizieller Kooperationspartner der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie



Kooperationspartner der AGA-Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie



Partner der Verbandsärzte Deutschland e. V.



Empfohlener Partner der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin

Sie sind Fachhändler?

Unser medi Kundencenter ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-333

OrderOrthopaedie@medi.de

Sie sind Arzt / Ärztin?

Unser kompetentes Ärzte-Team ist für Sie da.

T +49 921 912-977

F +49 921 912-377

Montag bis Donnerstag 09.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 09.00 bis 14.00 Uhr

arzt@medi.de

www.medi.de/arzt

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de



4 049772 463770

0030121/04.2026