



**PES ANSERINUS
SYNDROM**



**KNIE-
INSTABILITÄTEN**



**PATELLA-
SPITZEN-
SYNDROM**



**PATELLO-
FEMORALES
SCHMERZ-
SYNDROM**

ALLES, WAS DAS *KNIE* BEGEHRT!

Orthesen und Therapie-App von medi

Jeder Knieschmerz ist individuell.

Vertrauen Sie auf die vier Orthesen, die für spezifische Knieschmerzen mit unterschiedlichen Ursachen entwickelt wurden – und auf die Therapie-App für Patella-Indikationen.



Alles, was das Knie begehrt.

Orthesen von medi

Das medi Orthesen-Portfolio bietet Ihnen und Ihren Patient:innen vier Produkte für spezifischen Knieschmerz. Jede Orthese wurde speziell für eine Indikation entwickelt und exakt auf die Anforderungen des Krankheitsbildes abgestimmt. Denn: Jeder Knieschmerz ist anders und hat unterschiedliche Schmerzpunkte.

Indikation

Bei allen Orthesen zum spezifischen Knieschmerz **sinkt der VAS Schmerz-Score**. Mehr dazu auf den jeweiligen Produktseiten.

Kostenlos in jeder Verpackung:
Trainingstool inklusive Angaben zu therapiebegleitenden Übungen

Web-App **companion® patella**:
verordnungsfähig und
budgetneutral



Pes anserinus Syndrom



Genumedi® PA



Trainingsband



medi.biz/pa-br



Knie-Instabilitäten



Genumedi® pro




medi blox



medi.biz/pro-br



ORTHESEN UND DIGA
BUDGETNEUTRAL UND
VERORDNUNGSFÄHIG!

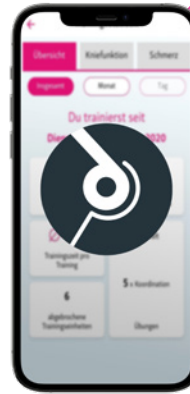

APP AUF REZEPT:

*DiGA companion patella bei
patellofemoralem
Schmerzsyndrom,
Patellaspitzensyndrom und
Patella(erst)luxation*

companion[®] patella

Proved by Deutsche
Kniesgesellschaft

Die browserbasierte, als Medizinprodukt
zugelassene App (DiGA) bildet die optimale
Therapieergänzung bei **spezifischem
Knieschmerz** rund um die Patella.
Ziel des **videogestützten, adaptivem
Trainingsprogramm** ist es, den **vorderen
Knieschmerz** zu reduzieren und die
Kniefunktionalität zu verbessern.

Die App wurde für folgende
Indikationen entwickelt:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Patella(erst)luxation

companion patella ist kombinierbar mit
den Knieorthesen **Genumedi PSS** und
Genumedi PT.

Medizinischer Nutzen bewiesen:^{15,16}

Die medizinischen Endpunkte Schmerz
und Kniefunktion verbessern sich
klinisch relevant und statistisch
signifikant.

Weitere Informationen zu companion
patella finden Sie auf Seite 17.



Patellaspitzensyndrom



Genumedi[®] PSS



Schrägbrett



medi.biz/pss-br



Patellofemorales
Schmerzsyndrom



Genumedi[®] PT



Trainings-Loop




medi.biz/pt-br




Genumedi® PA

Bei Pes anserinus Syndrom


Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0019

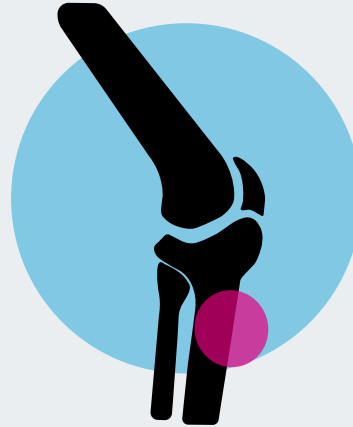

Ausgangssituation

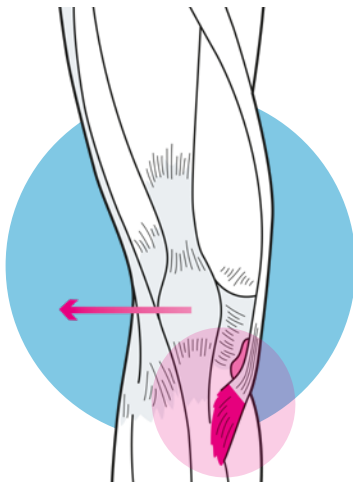

Effektive Unterstützung

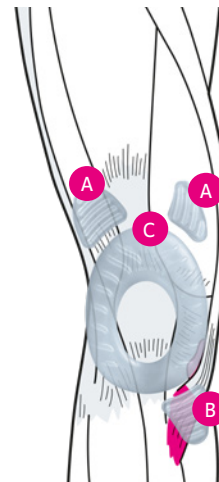

Funktionelle Fehlstellung:
Genu valgum (X-Bein)
Überdehnung der Sehnengruppe PA
(M. sartorius, M. semitendinosus, M. gracilis)

**Erhöhte pathomechanische
Belastung auf Sehnenansatz und Bursa**

**Erhöhter Zug / Druck, Überlastung / Reizung
+ Lateralisierung der Patella**

Pes anserinus Syndrom

A Wiederherstellung muskulärer Balance
• Detonisierung M. vastus lateralis durch
Triggerpunkt-Ansprache Trp₁
• Aktivierung M. vastus medialis

B Stimulation des Pes anserinus

C Sichere Führung der Patella

**Entlastung des Sehnenansatzes
Pes anserinus + weniger Schmerzen ^{1,2}**



Gurtsystem:


Druckregulierung auf den Sehnenansatz.

Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung.

3D-Pelotten-System:

A 3D-Oberschenkel-Pelotten: zur längerfristigen Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts

B 3D-Sehnen-Pelotte: zur Stimulation des Pes anserinus und zur Schmerzreduktion

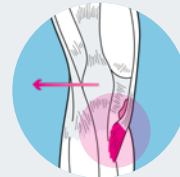

C 3D-Patella-Pelotte: lateral verstärkt zur sicheren Führung


Kostenlos in jeder Verpackung:

Trainingsband + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Effektive Schmerzlinderung mit Genumedi® PA

Reduzierung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 3,5 Punkte²

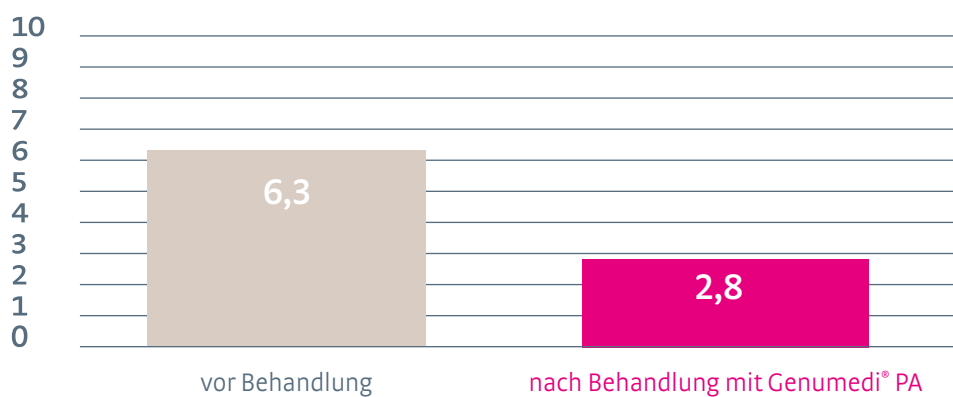


0 = kein Schmerz,
10 = maximaler,
unerträglicher Schmerz


Genumedi® pro

Bei Knie-Instabilitäten


Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0061

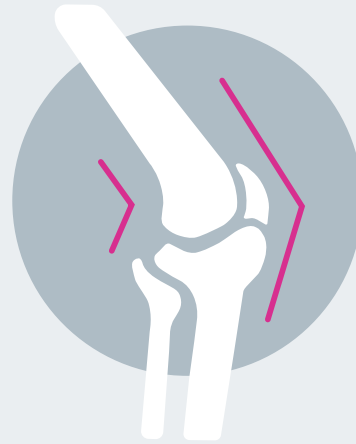

Ausgangssituation

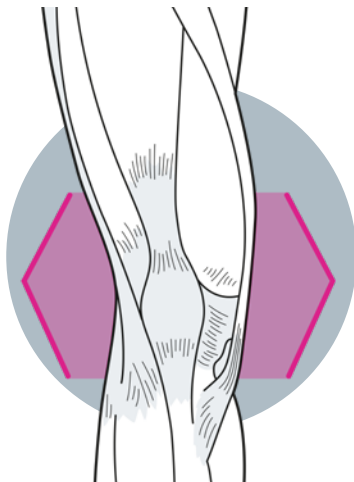

Effektive Unterstützung

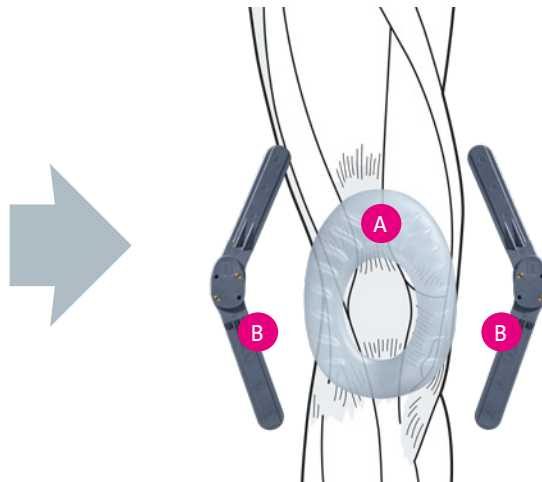

Verletzungshistorie
(z. B. Bandruptur) und degenerative
Veränderungen im Knie (Gonarthrose)



Laxität des Bandapparates

Knie-Instabilität

A Sichere Führung der Patella

B Entlastung des Kniegelenks

Unterstützung der physiologischen
Roll-Gleit-Bewegung
+ externe Stabilisierung
+ weniger Schmerzen³



Umlaufende Gurtbänder:

an Ober- und Unterschenkel
für zusätzlichen Halt.

A 3D-Silikon-Pelotte:

für einen sanften
Massageeffekt

B Easyglide-Gelenke:

zur Entlastung des
Kniegelenks und zur Unter-
stützung der
physiologischen
Roll-Gleit-Bewegung

Kostenlos in jeder Verpackung:

medi blox + QR-Code zu
therapiebegleitenden
Übungen!



medi.biz/pro-br

Effektive Schmerzlinderung mit Genumedi® pro

Reduzierung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 2 Punkte³




Genumedi® PSS

Bei Patellaspitzensyndrom


Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0015



Ausgangssituation

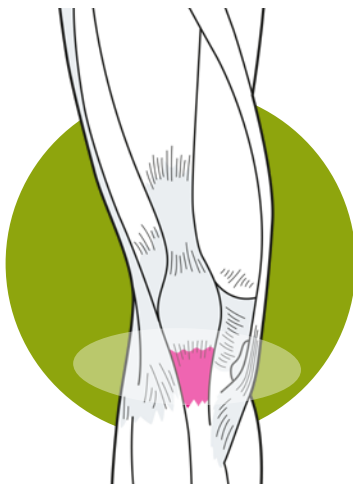

Effektive Unterstützung

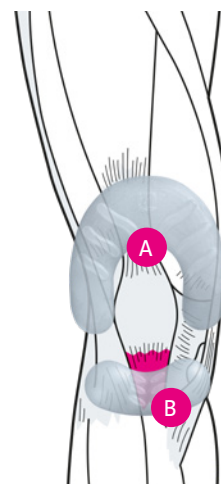

Überlastung an der Patellaspitze im
Ansatzbereich der Patellasehne


Reizung

Patellaspitzensyndrom /
Jumper's Knee / Runner's Knee

A Sichere Führung der Patella

B Stimulation der Patellasehne

Entlastung Patellasehnenansatz
+ weniger Schmerzen⁴⁻⁹

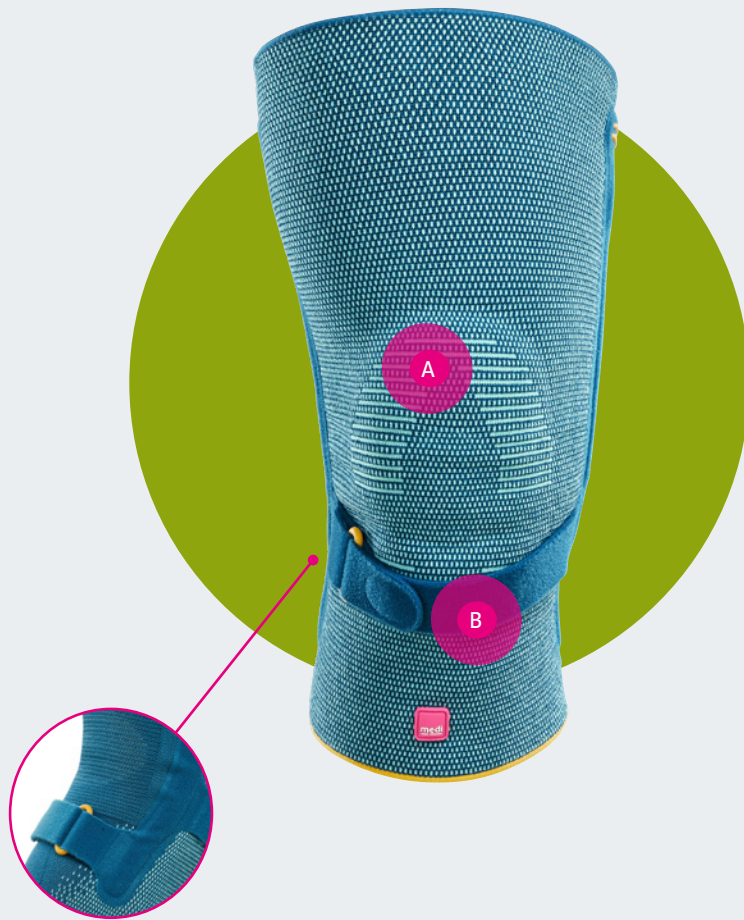

Gurtsystem:


Druckregulierung auf die Patellasehne.

Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung.

3D-Pelotten-System zur Schmerzreduktion:

A 3D-Patella-Pelotte:
zur sicheren Führung der Patella

B 3D-Sehnen-Pelotte:
zur Stimulation der Patellasehne und zur Schmerzreduktion

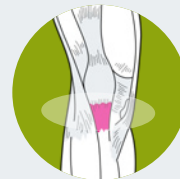


Kostenlos in jeder Verpackung:

Schrägbrett für evidenzbasierte Übungen⁴⁻⁷
+ QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Effektive Schmerzlinderung mit Genumedi® PSS

Reduzierung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 3,5 Punkte⁸

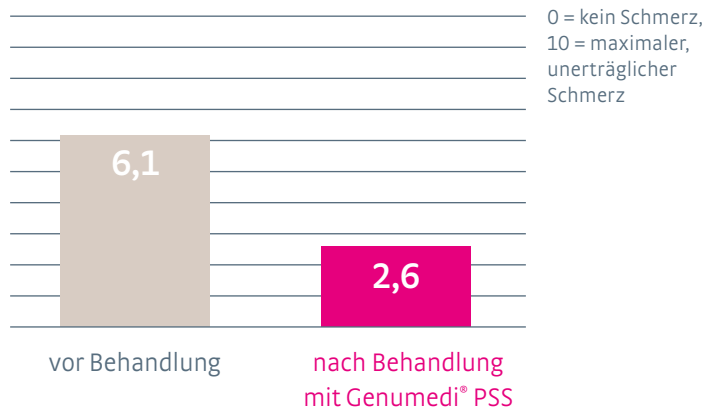


Positive Effekte des exzentrischen Trainings bei Patellasehnenbeschwerden belegt.

Studien belegen, dass die regelmäßige Durchführung von exzentrischen Kniebeugen auf einem 25°-Schrägbrett positive Effekte in der konservativen Therapie des Patellaspitzensyndroms erzielt.⁴⁻⁷


Genumedi® PT

Bei patellofemoralem Schmerzsyndrom


Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0012

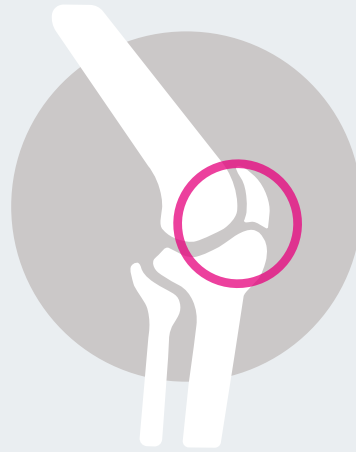

Ausgangssituation

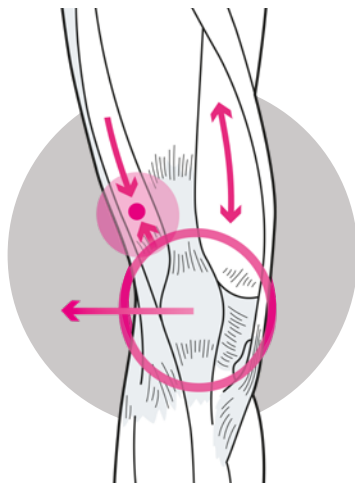

Effektive Unterstützung

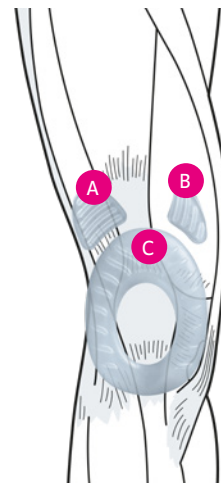

Muskuläre Dysbalance¹⁰

zwischen M. vastus lateralis (hyperton) und
M. vastus medialis (atrophisch)

➔ Ausbildung des Triggerpunktes TrP₁

Lateralisierung der Patella

Patellofemorales Schmerzsyndrom

Wiederherstellung muskulärer Balance^{11,12}

A Detonisierung M. vastus lateralis durch
Triggerpunkt-Ansprache TrP₁


B Aktivierung des M. vastus medialis

C Sichere Führung der Patella

Ursachenbehandlung
+ weniger Schmerzen¹³


Variante:

Silber

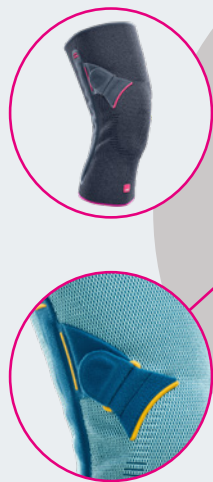

Gurt:

Druckregulierung
auf den Triggerpunkt

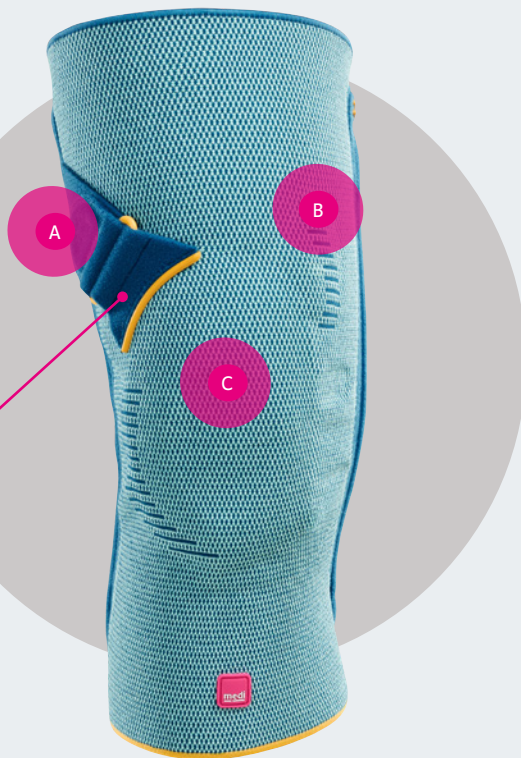


3D-Pelotten-System zur Schmerzreduktion:

- A** 3D-Detonisierungspelotte:
Triggerpunkt-Ansprache
zur Entspannung des
M. vastus lateralis
- B** 3D-Aktivierungspelotte:
Aktivierung des
M. vastus medialis
- C** 3D-Patella-Pelotte:
lateral verstärkt zur
sicheren Führung

Effektive Schmerzlinderung mit Genumedi® PT

Reduzierung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 2 Punkte¹³

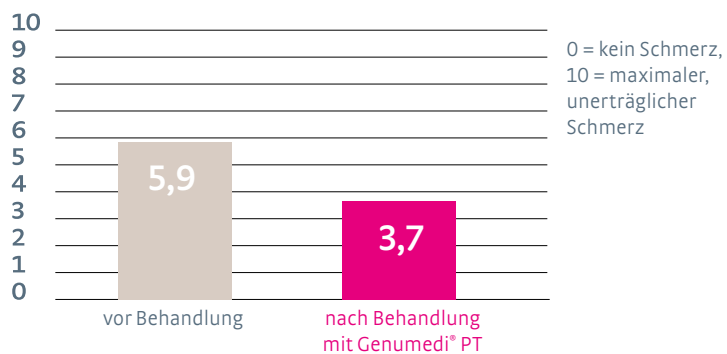

Kostenlos in jeder Verpackung:

Trainings-Loop + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Klinische Studie zu patellofemoralem Schmerzsyndrom

Knieorthesen haben einen unmittelbaren Effekt auf die Schmerzsymptomatik, die neuromuskuläre Aktivität sowie die Kinematik des Knies beim patellofemoralem Schmerzsyndrom.¹⁴

Folgende Endpunkte (MIT und OHNE Genumedi® PT, jeweils intraindividuell) wurden untersucht:

- Treppensteigen
- Springen
- Aufstehen und Setzen (Stuhl)
- Gehen (Laufband)



MIT der Genumedi® PT zeigte sich ...

... bei allen Übungen eine **signifikante Schmerzreduktion** um **33 – 56 %**.



... bei der Patienten-Subgruppe mit **verzögerter Aktivierung des M. vastus medialis** ein um **56 Millisekunden signifikant schnelleres Ansprechen** dieses Muskels.



... bei zwei Übungen (Treppensteigen, Aufstehen Stuhl) eine **signifikante Vergrößerung des Kniewinkels** in der sagittalen Ebene.

Produktübersicht

Genumedi® Knieorthesen zum spezifischen Knieschmerz

Genumedi® PA

Knieorthese zur Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus



HMV-Nr. 23.04.05.0019



Standard:

Links: K.172.20*
Rechts: K.173.20*

Extraweit mit Haftband:

Links: K.172.27*
Rechts: K.173.27*

* = Größe, Farbe = ● Silber

Warum Genumedi® PA?

Individuelle und punktgenaue Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus.

Zweckbestimmung:

Genumedi® PA ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges und benachbarter anatomischer Strukturen (z.B. Pes anserinus) notwendig ist, z. B.:

- Pes anserinus Syndrom
- Pes anserinus Bursitis
- Pes anserinus Tendinopathie
- Postoperative Schmerzzustände am Pes anserinus
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Arthrose und Arthritis

Genumedi® pro

Knieorthese zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks



HMV-Nr. 23.04.03.0061



Standard:

K.121.21*

Extraweit mit Haftband:

K.121.28*

* = Größe, Farbe = ● Silber

Warum Genumedi® pro?

Sichere Positionierung am Bein durch Easyglide-Gelenk und anatomisch vorgeformte Gurte.

Zweckbestimmung:

Genumedi® pro ist eine Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung.

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, z. B.:

- Leichte bis mittlere Instabilitäten des Kniegelenks
- Gonarthrose
- Leichte Seitenband-Instabilitäten

Genumedi® PT



Knieorthese zur Verbesserung der Patellaführung

HMV-Nr. 23.04.05.0012



Standard Silber:

Links: K.142.24*
Rechts: K.143.24*

Extraweit Silber mit Haftband:

Links: K.142.28*
Rechts: K.143.28*

Standard Mint Blue:

Links: K.142.30*
Rechts: K.143.30*

Extraweit Mint Blue mit Haftband:

Links: K.142.37*
Rechts: K.143.37*

* = Größe, Farbe =  Silber,  Mint Blue

Warum Genumedi® PT?

Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts mittels Detonisierung des M. vastus lateralis über TrP₁.
Minimierung des retropatellaren Drucks durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings.

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, z. B.:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patella maltracking
- Lateralisierung der Patella
- Hypermobile Patella
- Malalignment
- Patella (Sub-)Luxation

Zweckbestimmung:

Genumedi® PT ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.

Genumedi® PSS



Knieorthese zur Entlastung der Patellasehnenansätze

HMV-Nr. 23.04.05.0015



Standard:

K.150.30*

Extraweit mit Haftband:

K.150.37*

* = Größe
Farbe =  Lyons Blue

Warum Genumedi® PSS?


Kombination aus kompressivem Gestrick, Silikon-Pelotten und Patellasehnenband mit individueller Druckeinstellung über versetztes Gurtsystem.

Zweckbestimmung:

Genumedi® PSS ist eine Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges.

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, z. B.:

- Patellaspitzensyndrom (Jumper's Knee)
- Morbus Osgood-Schlatter
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

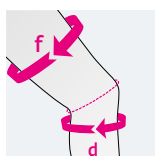

Messung Oberschenkel-Umfang (f) 15 cm oberhalb der Kniemitte, medial (auf Innenseite).
Unterschenkel-Umfang (d) 5 cm unterhalb der Kniemitte, medial (auf Innenseite).

Genumedi® Knieorthesen


(f) cm	(d) cm	Größe
34 – 37	22 – 25	*0 ¹
37 – 40	25 – 28	*1
40 – 43	28 – 31	*2
43 – 46	31 – 34	*3
46 – 49	34 – 37	*4
49 – 52	37 – 40	*5
52 – 55	40 – 43	*6
55 – 58	43 – 46	*7

Genumedi® Extraweit-Knieorthesen

(f) cm	(d) cm	Größe
46 – 49	31 – 34	*3
49 – 52	34 – 37	*4
52 – 55	37 – 40	*5
55 – 58	40 – 43	*6
58 – 61	43 – 46	*7

¹ Größe 0 nur bei Genumedi PSS erhältlich.

Die Features aller Orthesen zum spezifischen Knieschmerz

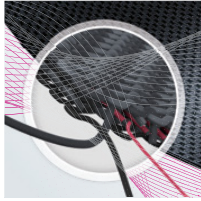

NEUESTE STRICKTECHNOLOGIE

leichtes Anziehen, angenehmes Tragegefühl, bewährte Stabilität




OPEN ENCLOSURE

Spürbar geringerer Druck auf die Kniescheibe durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings: Die innenliegende Stofftasche, in der sich die Pelotte befindet, ist in der Mitte offen und nur an ihrem äußeren Rand mit dem Gestrick verbunden. Somit bleibt das komplette Gestrick an der Kniescheibe elastisch und der Druck wird reduziert.



COMFORT ZONE MIT RIFFELSTRUKTUR

höherer Tragekomfort in der sensiblen Kniekehle

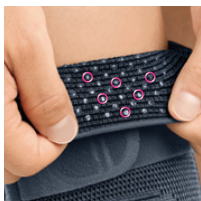


NON-SLIP

sicherer Halt durch integrierte Silikon-Punkt-Beschichtung




GRIP-ONS

seitliche Griff-Noppen für leichteres Anziehen

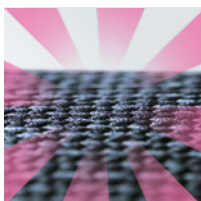

CLIMA FRESH

Die integrierte Clima Fresh Funktion wirkt geruchshemmend. Dies wird über eine spezielle Fadentechnologie oder eine besondere Ausrüstung im Produktionsprozess erreicht.

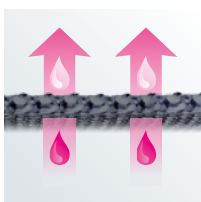

CLIMA COMFORT

ausgeglichenes Hautklima durch effektives Feuchtigkeitsmanagement

companion[®] patella

90-tägiges, videogestütztes, adaptives Trainingsprogramm: budgetneutral, verordnungsfähig, medizinischer Nutzen bewiesen¹

Erhalten Sie weitere Informationen zu companion patella.




Alle Vorteile auf einen Blick

✓ Studie bestätigt medizinische Wirksamkeit!

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestätigte mit der dauerhaften Listung im BfArM-Verzeichnis die Ergebnisse der randomisiert kontrollierten Studie (RCT)


- ✓ Die Verwendung der DiGA companion patella zeigte im Vergleich zur in Anspruch genommenen empfohlenen Standardtherapie mittels Physiotherapie eine Überlegenheit. Zudem haben sich sowohl der medizinische Endpunkt Schmerz als auch der medizinische Endpunkt Kniefunktion klinisch relevant und statistisch signifikant zur Vergleichsgruppe verbessert

¹ Online veröffentlicht unter DiGA Verzeichnis (BfArM): <https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/00998> (Letzter Zugriff: 14.02.2025)

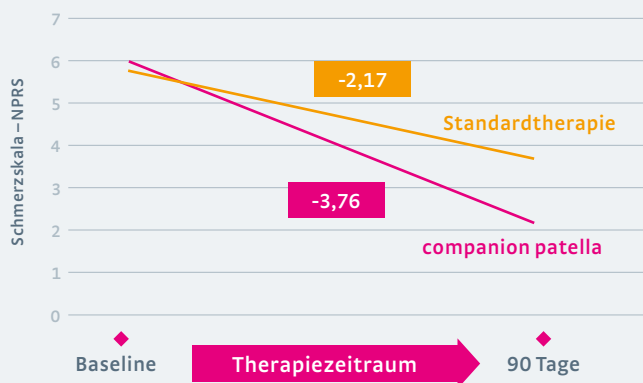

Entwicklung Schmerz (NPRS)

Die Patient:innen konnten ihren Knieschmerz durch das Training mit companion patella um **62 %** reduzieren.

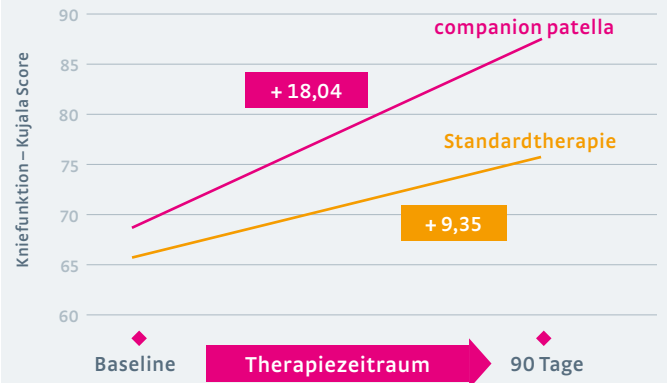

Entwicklung Kniefunktion (Kujala)

Das Training mit companion patella verbesserte die Kniefunktion um 26 % und somit um **93 %** mehr als eine Physiotherapie.

- ✓ Die Patient:innen aktivieren und nutzen companion patella eigenständig – zeit- und ortsunabhängig.
- ✓ companion patella ist die erste und bisher einzige adaptive App für spezifischen Knieschmerz, die das Training individuell auf den Patienten und seinen Genesungsverlauf anpasst.
- ✓ Behandelnde Ärzt:innen erhalten einen optionalen Einblick in die Verlaufsdaten – Optimaler Einblick in die Verlaufsdaten der App durch patientengenerierten PDF-Export.
- ✓ Ohne Mehraufwand – den technischen Support übernimmt medi.

App auf Rezept – die Rezeptierung

- budgetneutral
- DiGA: Muster 16 (gesetzliche Krankenversicherung)
- PZN 17850263
- Verordnungsdauer gleichzusetzen mit der Dauer des individuellen Therapieprogramms: 90 Tage
- Hinweis: DiGAs sollten laut KV immer einzeln auf dem Rezept vermerkt werden.

Erfahren Sie mehr zur richtigen Rezeptierung.



Sie sind Arzt / Ärztin? Bei Fragen sind wir gerne für Sie erreichbar: per Telefon: 0921 912-977 oder per E-Mail: companionpatella@medi.de

Quellenangaben

- ¹ Krüger R., Naila, Gutachten Genumedi PA, 2020 (unveröffentlicht): Ergebnisse nach Abschluss der Behandlung:
 - Verbesserung im Bereich der Schmerzskala um durchschnittlich 3,5 Punkte über alle Patient:innen hinweg
 - Sehr große Zufriedenheit der Patient:innen hinsichtlich Tragekomfort und Handling
- ² Pfalzer S., Ulm, Gutachten Genumedi PA, 2020 (unveröffentlicht): Ergebnisse nach einem Behandlungszeitraum von durchschnittlich 6 Wochen (n = 14):
 - Verbesserung im Bereich der Schmerzskala von durchschnittlich 6,3 auf 2,8 Punkte
 - Bewertung Tragekomfort, Handling, Stabilitätsgefühl mit sehr gut bis gut
- ³ Nürnberger J. Burghausen, Gutachten Genumedi pro, 2014 (unveröffentlicht): Ergebnisse nach einem Behandlungszeitraum von durchschnittlich 8 Wochen (n = 30):
 - Verbesserung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 2 Punkte bei 85 % der Patient:innen
 - Steigerung der Aktivität der Patient:innen
 - Sehr positive Beurteilung der Patient:innen hinsichtlich An- und Ausziehen, Rutschen und Passform
- ⁴ Purdam CR et al. Br J Sports Med 2004;38(4):395–397.
- ⁵ Jonsson P, Alfredson H. Br J Sports Med 2005;39(11):847–850.
- ⁶ Visnes H, Bahr R. Br J Sports Med 2007;41(4):217–223.
- ⁷ Zwerver J et al. Br J Sports Med 2007;41(4):264–268.
- ⁸ Ogon P., Freiburg, Gutachten Genumedi PSS, 2015 (unveröffentlicht): Ergebnisse nach einer Tragedauer von durchschnittlich 17,1 Tagen und einer täglichen Tragedauer von durchschnittlich 7,2 Stunden (n = 13):
 - Verbesserung des VAS Schmerz-Scores um durchschnittlich 3,5 Punkte
 - Alle Patient:innen erzielten zum Ende der Therapie eine deutliche Schmerzreduktion bis hin zur Schmerzfreiheit
 - Positive Beurteilung hinsichtlich Passform, Sitz, Länge der Bandage, Anziehbarkeit, Verständlichkeit der Handhabung
- ⁹ Berg R. Berlin, Gutachten Genumedi PSS, 2015 (unveröffentlicht): Ergebnisse nach einer Behandlungsdauer von 6 Wochen:
 - Bei 80 % komplette Schmerzfreiheit, bei 20 % deutliche Schmerzreduktion
 - Sehr gute Akzeptanz hinsichtlich Handling und Tragekomfort
- ¹⁰ Travell JG, Simons DG. Quadriceps-femoris-Gruppe. In: Travell JG, Simons DG (Hsg.), Handbuch der Muskel-Triggerpunkte. Untere Extremität und Becken. München: Urban & Fischer 2000;268–311.
- ¹¹ Singer BJ et al. Br J Sports Med 2011;45(8):640–645.
- ¹² Kompendium Orthopädie / Unfallchirurgie 2011, 8. Jahrgang, Nr. 1.
- ¹³ Wagner D., Stuttgart, Gutachten Genumedi PT, 2012 (unveröffentlicht); Herresthal J., Frankfurt, Gutachten Genumedi PT, 2012 (unveröffentlicht):

Ergebnisse nach einem Behandlungszeitraum über 12 Wochen mit (sehr) häufiger Tragedauer, (n > 20):

 - Schmerzlinderung und erhöhte Aktivität bei 80 % der Patient:innen
 - Reduktion des VAS Schmerz-Scores von durchschnittlich 5,9 auf 3,7 Punkte (1 = kein Schmerz, 10 = unerträglicher Schmerz)
 - Steigerung des Kujala-Scores (Anterior Knee Pain Scale) von durchschnittlich 63 auf 92 Punkte (100 = schmerzfrei, höchster Aktivitätsgrad)
 - Patientenzufriedenheit bei 94,4 % der Patient:innen
- ¹⁴ Kölle et al. Immediate effects of an elastic patellar brace on pain, neuromuscular activity and knee kinematics in subjects with patellofemoral pain. Arch Orthop Trauma Surg 2020;140(7):905–912.
- ¹⁵ Online veröffentlicht unter DiGA Verzeichnis (BfArM): <https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/00998> (Letzter Zugriff: 05.11.2024)
- ¹⁶ Ferner et al., The application of a digital therapeutic reveals superior outcome compared to standard care in patients with anterior knee pain-a randomized controlled trial, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2025, doi: 10.1007/s00402-025-05787-y, PMID: 40069462

Zweckbestimmung companion® patella: Die Digitale Gesundheitsanwendung companion patella ist ein therapeutisches Trainingsprogramm. Die Nutzung ist für Anwender:innen mit diagnostiziertem „Vorderem Knieschmerz“ vorgesehen. Dabei werden den Nutzer:innen individualisierte Therapieinhalte evidenzbasiert und leitliniengerecht für die ärztlich diagnostizierten Indikationen „patellofemorales Schmerzsyndrom (PFSS)“, „Patellaspitzensyndrom (PSS)“ und „Patella(erst)luxation“ zum Eigentaining bereitgestellt. Basierend auf persönlichen Angaben der Anwender:innen zu Schmerz- und Belastungsempfinden wird der bewegungstherapeutische Trainingsplan im Verlauf der Therapie kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer:innen angepasst. Zusätzlich bereitet die digitale Gesundheitsanwendung Daten zu Krankheitsverlauf und Trainingsaktivität für den Nutzer grafisch auf. Neben der Bewegungstherapie bietet ein edukativer Bereich innerhalb der digitalen Gesundheitsanwendung sowohl krankheitsspezifische als auch allgemeine medizinische Wissensartikel.

Erläuterung zur medizinischen Zweckbestimmung

Companion patella ist nicht dafür bestimmt, Informationen zu liefern, die für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen herangezogen werden.



Empfohlener Partner der
Gesellschaft für Orthopädisch-
Traumatologische Sportmedizin



Offizieller Kooperationspartner
der Deutschen Vereinigung für
Schulter- und Ellenbogenchirurgie



Partner der Verbandsärzte
Deutschland e. V.

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
OrderOrthopaedie@medi.de
www.medi.de



0030245/02.2026