

Upgrade medi Arm fix[®]

Schulterlinge jetzt auch
mit Kühlkomresse verfügbar



Die Schultergelenkorthese von medi gibt es jetzt auch als ICE-Variante mit Kühlkomresse – für weniger Schmerzen und mehr Wohlbefinden.

Die Kühlung hemmt die Erregbarkeit der Schmerzrezeptoren an der Schulter und reduziert somit die subjektive Schmerzwahrnehmung. Dadurch wirkt sie vor allem nach einer Operation oder einem akuten Trauma schmerzlindernd und kann sogar den Bedarf an Schmerzmitteln senken.

Die Kühlkomresse ist anatomisch vorgeformt, sodass sie möglichst flächig im Schulterbereich aufliegt. Das formstabile, nichtfließende Kühlgel in der Komresse gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung. Zur richtigen Positionierung sollte die Kühlkomresse mit der Aussparung auf das Acromion (Schulterdach) gelegt werden.

Wichtig

Die Kühlkomresse sollte maximal 30 Minuten in das Gefrierfach oder zwei Stunden in den Kühlschrank. Sie darf nicht zu kalt sein, um die Durchblutung im Gewebe nicht zu stark zu vermindern.

**Maximale
Anwendungszeit:**
20 – 30 Minuten

Weiterführende Informationen zum Produkt

Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/arm-fix-ice gelangen
Sie zu weiteren Informationen
und (Anzieh-)Videos.



medi Arm fix[®] ICE

SchulterSchlinge zur Lagerung in Innenrotation,
0° Abduktion

SchulterSchlinge
jetzt auch mit
Kühlkomresse
verfügbar

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0019

Zweckbestimmung

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in
definierter Position.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schulterge-
lenks in Innenrotation notwendig ist, zum Beispiel:

- Konservativ bei (chronischer) vorderer Schulterluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Rezeptbeispiel

Krankenkasse bzw. Kostenträger	BVG	Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Gebühr frei	6	7	8	9		
Geb.- pl.	Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung			
noctu			Gesamt-Brutto			
Sonstige			Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.			
			Faktor			
			Taxe			
Unfall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status			
Arbeits- unfall	Vertragsarzt-Nr.	VK gültig bis	Datum			

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

23.09.01.0019

Mit Kühlkomresse zur Linderung
anhaltender Schmerzzustände

Konservativ bei vorderer
Schulterluxation / chronischer
vorderer Subluxation


1 Stück medi Arm fix[®] ICE

Vertragsarztstempel

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2002)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebnummer

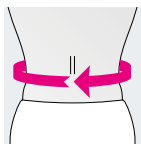

Artikel	medi Arm fix Mini	medi Arm fix	medi Arm fix Maxi
Taillen-Umfang (cm)	bis 85	85 – 125	125 – 140
Bauchgurt-Breite (cm)	12	12	16
Art.-Nr.	R.050.6◇9	R.050.7◇9	R.050.4◇9

◇ = Variante: 1 = Standard, 9 = ICE

