

## Upgrade medi Easy sling

Schulterlinge jetzt auch  
mit Kühlkomresse verfügbar



**Die Schultergelenkorthese von medi gibt es jetzt auch als ICE-Variante mit Kühlkomresse – für weniger Schmerzen und mehr Wohlbefinden.**

Die Kühlung hemmt die Erregbarkeit der Schmerzrezeptoren an der Schulter und reduziert somit die subjektive Schmerzwahrnehmung. Dadurch wirkt sie vor allem nach einer Operation oder einem akuten Trauma schmerzlindernd und kann sogar den Bedarf an Schmerzmitteln senken.

Die Kühlkomresse ist anatomisch vorgeformt, sodass sie möglichst flächig im Schulterbereich aufliegt. Das formstabile, nichtfließende Kühlgel in der Komresse gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung. Zur richtigen Positionierung sollte die Kühlkomresse mit der Aussparung auf das Acromion (Schulterdach) gelegt werden.

### Wichtig

Die Kühlkomresse sollte maximal 30 Minuten in das Gefrierfach oder zwei Stunden in den Kühlschrank. Sie darf nicht zu kalt sein, um die Durchblutung im Gewebe nicht zu stark zu vermindern.

**Maximale  
Anwendungszeit:  
20 – 30 Minuten**

## Weiterführende Informationen zum Produkt

Per QR-Code oder Short-URL  
[medi.biz/easy-sling-ice](https://medi.biz/easy-sling-ice) gelangen  
Sie zu weiteren Informationen  
und (Anzieh-)Videos.



