


# medi® Smartfit OA

Einstellen von Flexions- und  
Extensionsbegrenzung


Artikelnummer  
Keileset  
G.E31.008



Legen Sie den entsprechenden Keil ein.

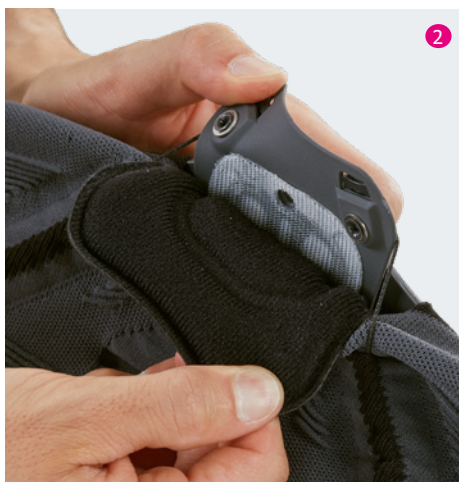

Trennen Sie das Gelenk vom Polster.

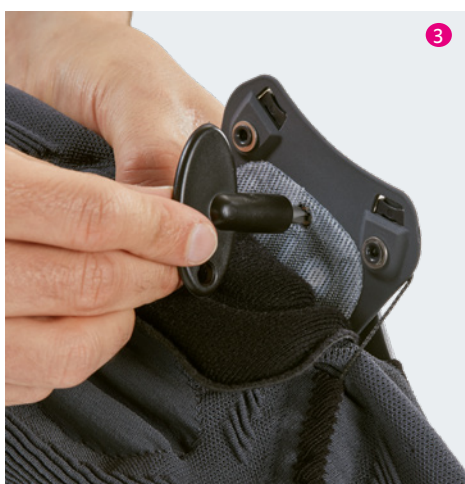

Schrauben Sie den Keil fest.



Befestigen Sie das Gelenk nun wieder  
am Polster.

## medi Tipp

Bewegen Sie das Gelenk nach dem  
Festschrauben der Keile ein paarmal  
durch, um sicher zu sein, dass das Gelenk  
frei läuft und die Keile fest sitzen.