

medi Hospitalbutler

Die Anziehhilfe für Klinik und OP.



Eigenschaften

- Größenverstellbarer Durchmesser
- Einfach in der Handhabung
- Zeitsparend und wirtschaftlich
- Erleichtert das Anlegen von klinischen Kompressionsstrümpfen

Einfaches Anlegen



1. Durch Hochziehen der Arretierung stellen Sie die Weite des medi Hospitalbutlers so ein, dass er berührungsfrei über den Knöchel und ggf. die Wade des Patienten passt.



2. Das Haftband stülpen Sie über den Bügel und ziehen den Strumpf auf.



3. Ziehen Sie den Strumpf so weit auf, bis die Farbmarkierung am oberen Rand des Bügels erscheint.



4. Schieben Sie den medi Hospitalbutler über den Knöchel – und wenn möglich – bis unter das Knie des Patienten. Anschließend ziehen Sie den medi Hospitalbutler wieder nach distal weg.



5. Legen Sie den Strumpf an der Leistenbeuge an. Die Strumpflänge wird durch den Zug bestimmt.